

バーチャルスライドサーバー導入のお知らせ



いつも、弊社の標本作製およびバーチャルスライドサービスをご利用いただきありがとうございます。

弊社では、2021.12月に「バーチャルスライドサーバー」を2台体制にしました。

このシステムは、病理スライドをデジタルデータ化するだけでなく、サーバーにアップすることを目的としたシステムです。

サーバー利用の良い面としては下記になります。

- ①バーチャルスライドをサーバーにアップすることで、Windowsだけでなく、MACやスマートフォンでも閲覧可能であるため、インターネットの環境があるところであれば、どこでも見ることができる。
- ②学会発表、Zoom会議などで、バーチャルスライドを表示できるため、大切なスライドを持ち運ぶ必要がない。
(例：医・歯・薬学部などの病理実習用で利用されています。)
- ③「バーチャルスライド作製費用+500円/枚」で、サーバーにアップすることができる
(年会費、月額費用の御請求はありません。保存期間の制限もありません(2022.2月現在) とってもお得です)
- ④病理スライドの保管は、経年劣化による退色などあるが、バーチャルスライド作製することで、大切なデータを、半永久的に保存することができる。
(近年の災害などに対して、機器管理上、大切なデータをサーバーなどに分散させる考え方が広まっています。)

バーチャルスライド受託サービス 価格表(税別:1スライド当たり)

バーチャルスライドの種類	スキャン倍率	0～10枚	11～50枚	51～100枚	101～500枚	501～1000枚	1000枚以上
明視野像 HE染色・特殊染色等(26mmx76mm)スライド	200x像	¥2,500～	¥2,300～	¥2,100～	¥1,900～	¥1,700～	¥1,500～
	400x像	¥3,500～	¥3,300～	¥3,100～	¥2,900～	¥2,700～	¥2,500～
暗視野像, 蛍光単染色(注1) DAB発色の免疫染色など (26mmx76mm)スライド	100x像	¥3,500～					
	200x像	¥4,000～					
	400x像	¥5,000～					

注1：蛍光スライドの撮影倍率は200x像までになります(400x像には対応しません)。また発現態度によっては100x像の方がきれいな場合がありますので、倍率を変更する場合があります。 予め御了承ください。



株式会社バイオ病理研究所
代表取締役 金林 智倫

1. GoogleChrome、インターネットエクスプローラー、Edge、やSafariなどのWebブラウザを開く。
2. ホームページのURLが表示される部分に、「218.228.67.46」を入力して、ENTERを押す。
(http://218.228.67.46 がバイオ病理のサーバーの住所になります)



3. オリンパスの「Net Image Server-Web Access」の画面が出てきます。

OLYMPUS

Net Image Server SQL - Web Access

Please sign in

User name

Password

Database
DB001

Windows Authentication

Log in

Build: 19668 (v1.0.6d52)

© 2020 Olympus

①仮IDを入力


guest

②仮パスワード入力


guest1234


③ログイン

4. 「sample」というフォルダーをクリックする。

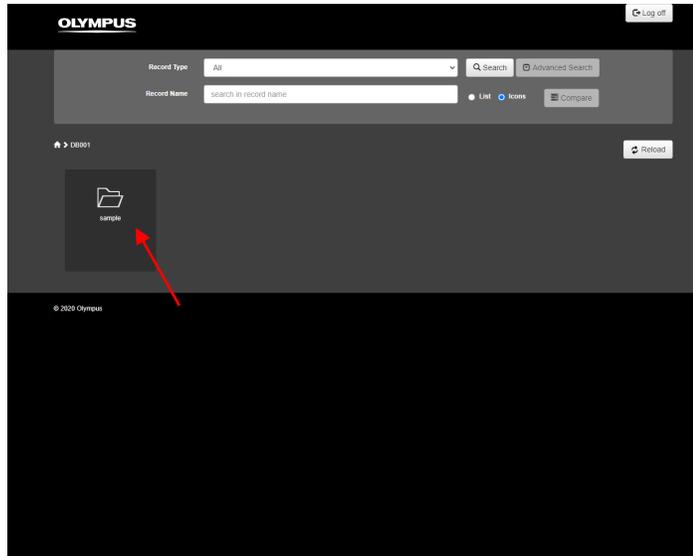


5. 見たいスライドをクリックする。

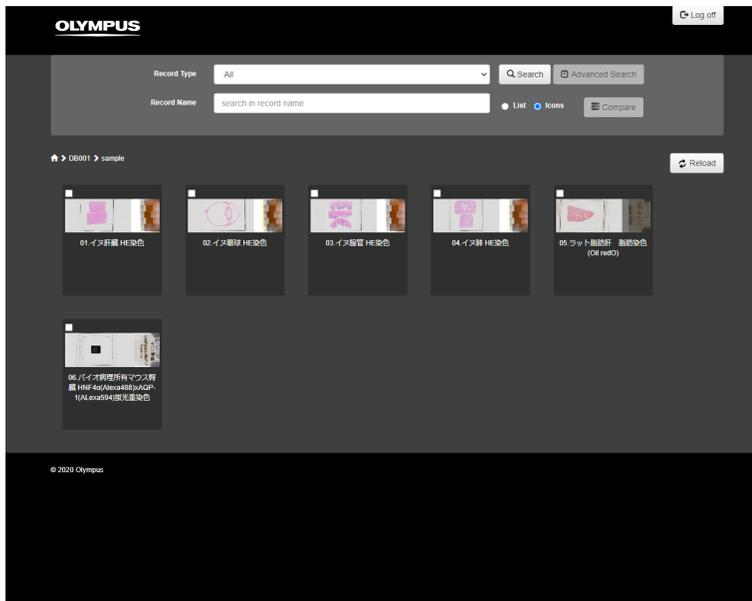

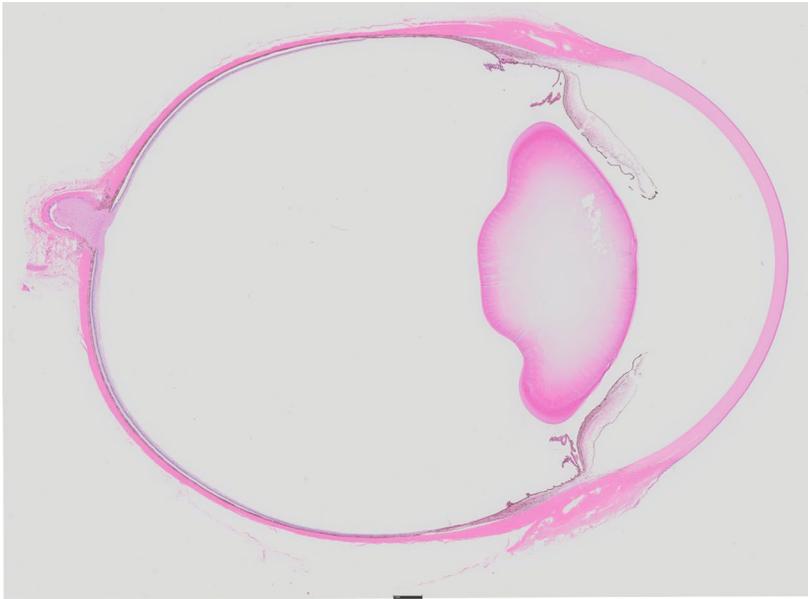

全体像(縮小)

Webブラウザ上で、マウスをスクロールすることで、拡大・縮小することもできます。
また、好きな拡大像で、切り貼りすることもでき、その場所をjpegとして、PCのデスクトップなどに保存することも可能です。

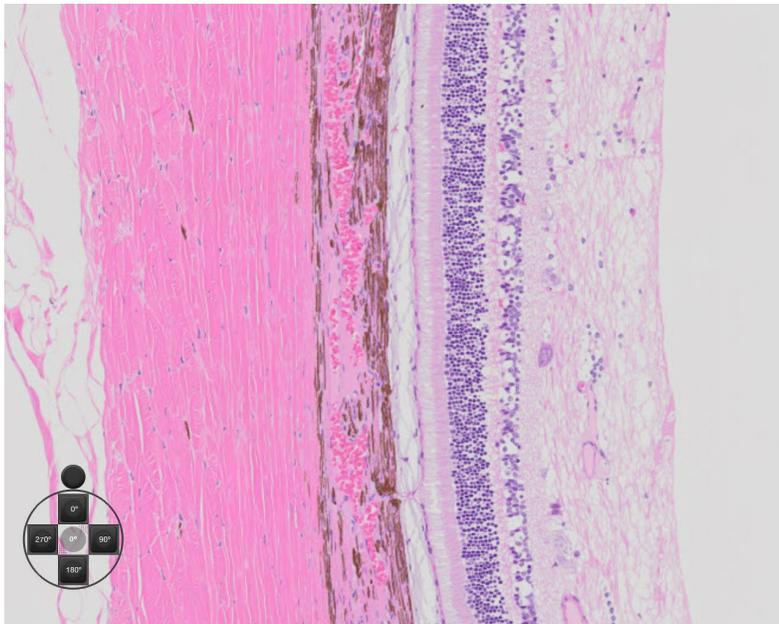

拡大像